


URZĄDZENIE DO PODCIŚNIENIOWEGO MASAŻU CIAŁA
Dermomasażer
D 304
INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

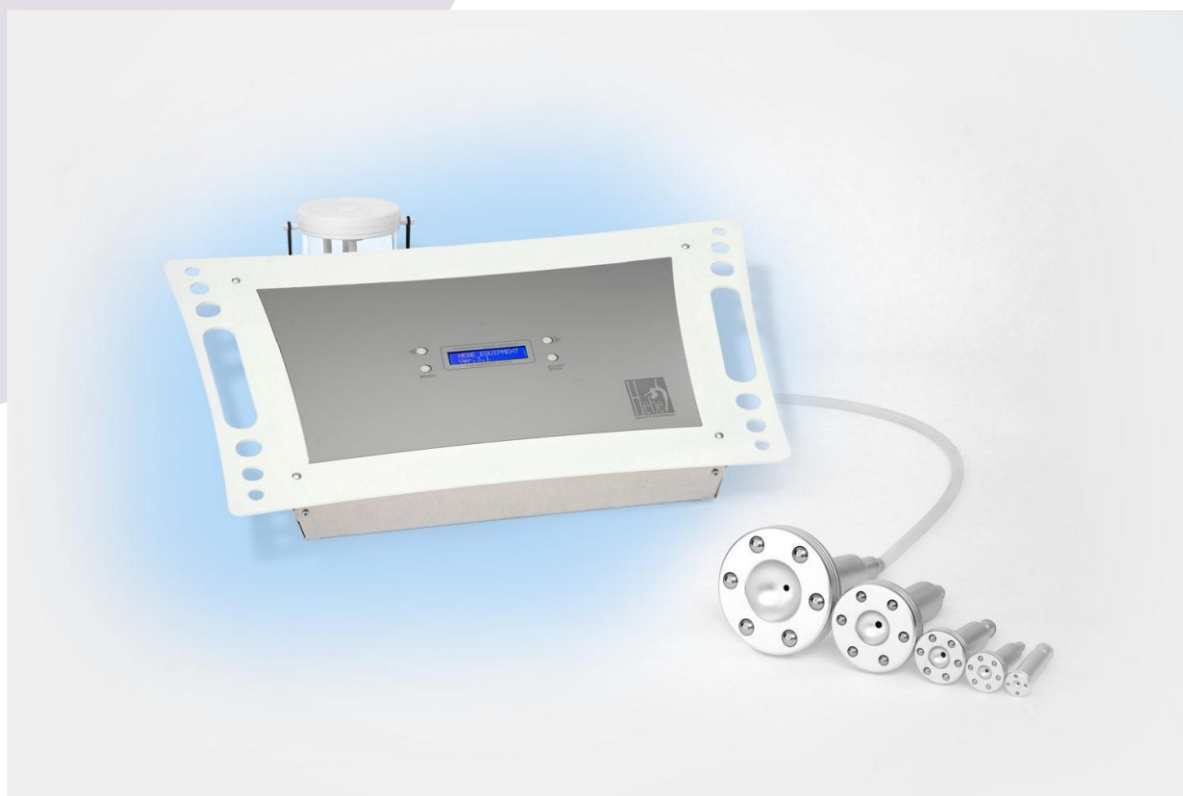

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania 230V 50 Hz
- Moc pobierana 60W
- Bezpiecznik 3,15 A
- Wydatek pompy 20 l/min
- Max podciśnienie na mierzone na zakończeniu głowicy: -0.5 MPa
- Zakres czasu pracy 1-99min
- Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej.
- Wymiary bazy 493x297x170mm

UWAGA !

NINIEJSZY PODRĘCZNIK ODNOSI SIĘ TYLKO I WYŁĄCZNIE DO OBSŁUGI TECHNICZNEJ APARATU. W ŻADNYM WYPADKU NIE JEST PODRĘCZNIKIEM OPISUJĄCYM METODYKĘ ZABIEGU. ZAWARTE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ZABIEGU, PRZECIWWSKAZANIA I ZALECENIA PROSIMY TRAKTOWAĆ JAKO DODATKOWĄ INFORMACJĘ.

URZĄDZENIE PRZEZNACZONE JEST TYLKO DLA PROFESJONALISTÓW Z ODPOWIEDNIM PRZYGOTOWANIEM. URZĄDZENIE NIE JEST SPRZĘTEM MEDYCZNYM, NIE JEST PRZEZNACZONE DO DIAGNOZOWANIA ANI LECZENIA CHORÓB. JEŻELI KLIENT NIE JEST PEWNY CZY MOŻE PODDAĆ SIĘ ZABIEGOWI POWINIEN SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM. PRODUCENT NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWO PRZEPROWADZONE ZABIEGI ORAZ JAKIEKOLWIEK SZKODY SPOWODOWANE NIEPRAWIDŁOWYM

UWAGI O BEZPIECZEŃSTWIE UŻYTKOWANIA

Aby poprawnie użytkować (obsługiwać) sprzęt należy dokładnie zapoznać się z treścią podręcznika użytkownika. Prosimy zachować niniejszy podręcznik, by móc korzystać z zawartych w nim instrukcji i wskazówek również w przyszłości.

UWAGA!

Przeczytaj uważnie niniejszy podręcznik użytkownika i postępuj zgodnie z jego instrukcjami. Pamiętaj, postępowanie niezgodne do zaleceń narusza twoje prawo do roszczeń gwarancyjnych.

OSTRZEŻENIE!

OTWARCIE OBUDOWY GROZI PORAŻENIEM PRĄDEM.

Aparat jest zasilany napięciem z sieci. Wszelkie uszkodzenia przewodów i obudowy zagrażają użytkownikowi porażeniem prądem, oraz mogą spowodować poważne uszkodzenie sprzętu oraz powstanie pożaru. Każde uszkodzenie należy niezwłocznie zgłosić do serwisu. Urządzenie musi być uziemione.

OSTRZEŻENIE!

Aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru lub porażenia prądem, nie wolno wystawiać sprzętu na działanie wody i należy chronić go przed wilgocią. Nie wolno umieszczać sprzętu w miejscach narażających go na zroszenie


PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGU

- Stany zapalne skóry
- Uszkodzenia skóry
- Skłonności do krwawień i powstawania wybroczyn (siniaków)
- Popękane naczynka
- Niewydolność krążenia
- Gorączka, osłabienie
- Nadciśnienie tętnicze
- Cięża
- Choroba nowotworowa


Przygotowanie aparatu do pracy

1. Ustawić aparat na płaskiej stabilnej powierzchni.
2. Podłączyć przewód sieciowy do aparatu i gniazdka sieciowego.
3. Zamknąć szczelnie pokrywę filtra..
4. Zamontować wybraną głowicę ssącą.
5. Włączyć aparat przyciskiem na panelu
6. Ustawić właściwą siłę ssania
7. Ustawić czas zabiegu.
8. Aparat jest gotowy do pracy.

Opis przełączników, wskaźników i regulacji aparatu.

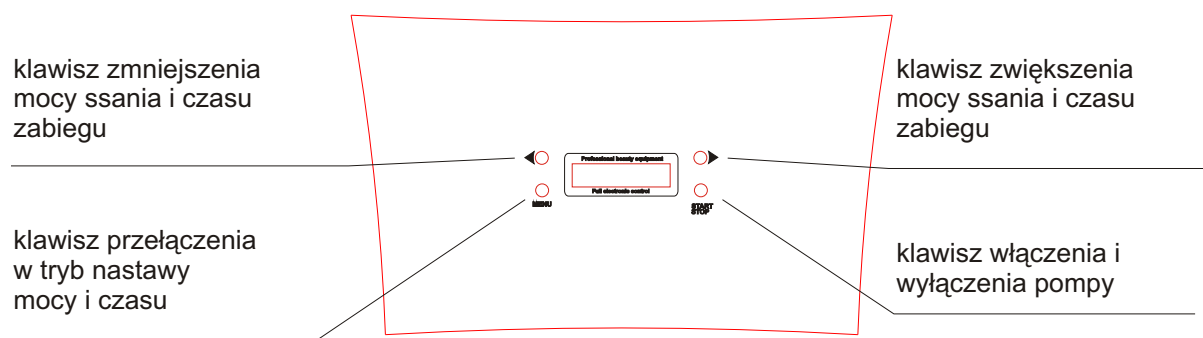

Widok ścianki tylnej urządzenia

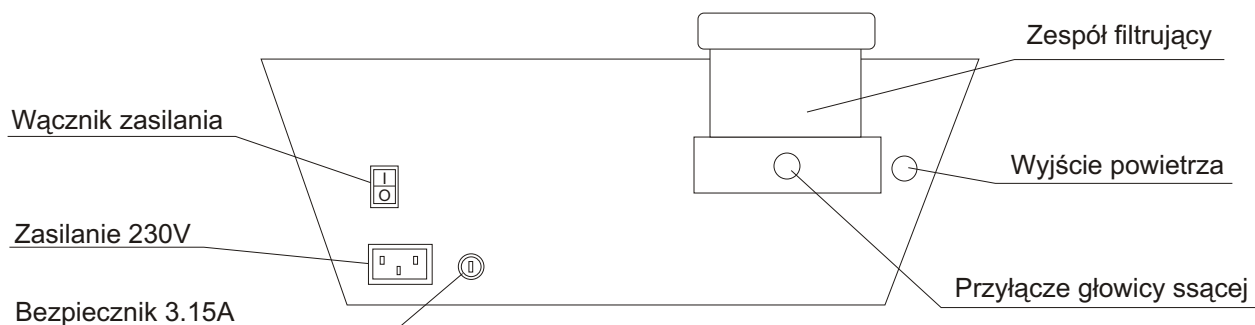

Przeznaczenie głowic

1. Głowica do blizn i rozstępów - średnica 15 mm
2. Głowica do brzucha i ramion - średnica 25 mm
3. Głowica do brzucha i ramion - średnica 35 mm
4. Głowica do ud i pośladków - średnica 55 mm
5. Głowica do ud i pośladków - średnica 85 mm

Czyszczenie urządzenia oraz filtru

Po każdym zabiegu należy oczyścić głowice, rurkę ssącą oraz filtr z resztek preparatu.

Przygotować w miseczce roztwór ciepłej wody z detergentem (mydło, płyn do naczyń itp)

Zanurzyć w roztworze głowice i włączyć urządzenie.

Napełnić filtr do momentu wyłączenia aparatu.

Wodę z filtra należy opróżnić podstawiając miseczkę pod filtr i wyciągając korek umieszczony w jego dnie.

Czynność należy powtórzyć używając roztworu z preparatem do dezynfekcji.

Zdjąć pokrywę filtra i wytrzeć wszystko chusteczkami antyseptycznymi.

Po wyczyszczeniu należy założyć pokrywę mocno ją wciskając na uszczelkę.

Konserwacja

Przed podjęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy wyłączyć wtyczkę zasilacza z gniazda sieciowego.

Aparat oprócz czyszczenia filtra, rurki ssącej i głowic nie wymaga żadnych czynności obsługowych. Obudowę można czyścić nawilżoną szmatką, uważając aby woda nie dostała się do wnętrza. Trudne zabrudzenia można usunąć benzyną ekstrakcyjną (nie wolno używać acetonu).

LISTA TYPOWYCH USTEREK

1. Aparat się nie włącza - sprawdź czy w gniazdku jest prąd i czy aparat jest podłączony do sieci.
2. Aparat się nie włącza - sprawdź bezpiecznik, w razie potrzeby zamontuj nowy (250V, 3,15A)
3. Pompa pracuje ale brak jest ssania - sprawdź czy wężyk między aparatem a manipulatorem nie jest uszkodzony, w razie uszkodzenia zamów nowy. Możesz uciąć uszkodzony kawałek i nasunąć go ponownie na manipulator. Sprawdź dokręcenie głowicy.
4. Pompa pracuje ale brak jest ssania - sprawdź czy dobrze jest założona pokrywa filtra, sprawdź stan uszczelki.
6. Pompa pracuje ale brak jest ssania -dobrze wyczyść filtr.